

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Дата продажи _____

М.П. _____

Подпись ОТК _____



Дата 30 ОКТ 2020

М.П. _____

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в декорирование, совершенствовать конструкцию изделия, заменять фурнитуру без снижения качества изделия, без внесения изменений в данную инструкцию.

Технический паспорт изделия

Стойка для установки облучателя-рециркулятора СПР-2

ТО 32.50.30.110-81190519-02-2017



1. Назначение изделия

Стойка СПР-2 предназначена для установки облучателя-рециркулятора двухлампового в медицинских учреждениях и организациях.

2. Технические данные и конструкция

Стойка имеет металлический каркас с полимерно-порошковым покрытием. Основание стойки оснащено 2 колесами и 2 стационарными опорами.

Габаритные размеры ± 5 мм (Д*Г*В) 320*310*1100мм

Вес изделия не более 2,2 кг.

3. Комплектация.

Штатив - 1 шт.
Основание - 1 шт.
Комплект крепежа - 1 шт.

4. Подготовка к работе

Распакуйте изделие в сухом помещении при температуре окружающей среды $+10...+35^{\circ}\text{C}$.

Произведите санитарную обработку изделия: обработайте наружные и внутренние поверхности изделия салфеткой из бязи ГОСТ 11680 или марли ГОСТ 11109, смоченной 3% р-ром перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства или этиловым спиртом. Салфетка должна быть отжата.

Устанавливайте стойку на ровной горизонтальной поверхности.

Не ставьте на стойку посторонние предметы. Перед каждым использованием проверяйте стойку на наличие механических повреждений, надежность крепления всех элементов.

На основание поставьте штатив, совместив отверстия и развернув так, чтобы ручка смотрела в сторону колес.

Вставьте болты с обратной стороны, подложив шайбу и закрепите гайкой.

5. Правила ухода

Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 45% до 70% при температуре плюс 25°C .

Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, а также различных растворителей, щелочей, кислот, воздействия влаги и тепла, во избежание коробления, отслаивания покрытий стойку содержите в сухом виде.

Поверхности следует протирать сухой мягкой тканью.

Поверхности изделия устойчивы к разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113. Обрабатываются изделия 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177, с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос», по ГОСТ 25644-96 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

6. Сведения об эксплуатации.

Изделие в упаковке предприятия изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Хранение изделия не более 5 лет.

Средний срок службы до списания не менее 6 лет.

Транспортировка и хранение стойки без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность.

Стойка не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

7. Сведения о приемке

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.